


**TEKERLEKLİ SANDALYE LAZIMLIKLI
KULLANIM KILAVUZU
MODEL NO: RLTS-01**



PARAMETRELERİ

TOPLAM BOY	92CM
TOPLAM GENİŞLİK	57.5CM
TOPLAM UZUNLUK	81CM
BORU ÇAPI	2.54CM
NET AĞIRLIK	7.6KG
AĞIRLIK KAPASİTESİ	150KG

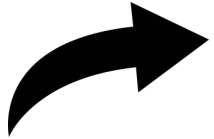

Kurulum ve Kullanım
Videosu için
For Installation and
Usage Video
**Tarattınız.
Scan it.**




ECE TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL SAN. TİC. AŞ.

Cihangir Mah. Kemal Türkler Sok. No:5/1
Avcılar/İstanbul/Türkiye 444 78 96
www.ecemedikal.net/www.respirox.com.tr


MONTAJ TALİMATI



1. Aksesuarlar : Yan çerçeve*2, çapraz çubuk*2, bekrrest*1, pedal*1, kova için braket*1 kova*1 mavi koltuk*1 tekerlek* 4

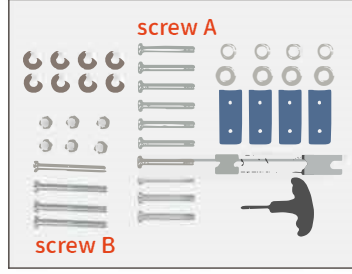

2. Donanım: mavi plastik kapak*4, vida A*10, vida B*4, somun*8, yay*4, daire rondela*8, yaylı rondela*4, altıgen tornavida*1, anahtar*2

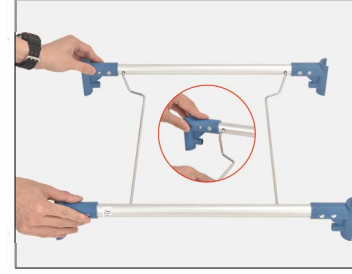


3. Kova braketini geçiş çubuğuna takın, lütfen ön ve arka geçiş çubuğunun delik mesafesine dikkat edin.




4. Bir yan çerçeveyi mavi plastik kapaklarla sabitleyin.



5. Sol ve sağ çerçeveleri taktıktan sonra, A vidasını altıgen tornavida ile sıkın.

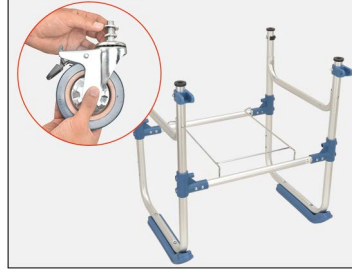

6. Tekerlekleri takmak için çerçeveyi ters çevirin. Lütfen metal halkaları yerleştirin.

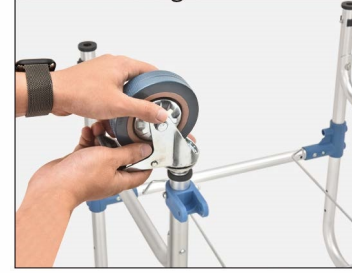

7. Lütfen tekerlekleri takmadan önce tekerleri sabitleyin.



8. Sırtlığı çerçeveye monte edin.



9. Kolçağı B vidasıyla, her iki tarafa daire somun ekleyerek takın.



10. Kapak çemberi pullarını ve somunu B vidasına takın, altıgen tornavida ve anahtarla sıkın.



11. Pedalı çerçevenin 2 mavi plastik parçasına takın.



12. A vidasını ve somunu altıgen tornavida ve anahtarla kilitleyin.



13. Tekerlekler ve pedal takıldı.



14. Kovayı kovanın braketine yerleştirin, koltuğu çapraz çubuklara takın.



15. Kurulum tamamlandı

1. Kullanmadan önce lütfen vidaların gevşek olup olmadığını kontrol edin. Vida tertibatının hasarlı olup olmadığını, sırtlığın, kolçağın veya braketin sağlam veya hasarlı olup olmadığını lütfen kontrol ediniz.

2. Çevre hijyenini korumak için, lütfen kullanımdan sonra tuvaleti zamanında temizleyin, durulayın ve bir sonraki kullanım için kurulayın.