


**TEKERLEKLİ SANDALYE LAZIMLIKLI
KULLANIM KILAVUZU
MODEL NO: RLTS-02**



Kurulum ve Kullanım
Videosu İçin
For Installation and
Usage Video
**Tarattınız.
Scan it.**

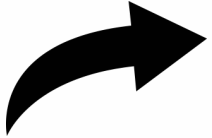

ECE TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL SAN. TİC. AŞ.

Cihangir Mah. Kemal Türkler Sok. No:5/1
Avcılar/İstanbul/Türkiye 444 78 96
www.ecemedikal.net/www.respirox.com.tr

MONTAJ TALİMATLARI



1. Bileşenler: Ana Çerçeve x1 adet; Sırtlık x1 adet; Koltuk Plakası x1set; kulak tekerleği x2 adet; ön tekerlek x2 adet; eğim önleyici ayak dayama yeri x2 adet; donanım bağlantı parçaları: C-kelepçe x2 adet; Motor (Quincunx) topuzu x2 adet; Yıkayıcı x8 adet; Vidalar x2 adet; Vida kapağı x2 adet; Tornavida x1 adet



4. Arka tekerlekleri ana şasiye bağlayan vidaları Motor (Quincunx) düğmesi ile sıkın.



7. Koltuğu kullanmadan önce, lütfen hem sol hem de sağ taraftaki C-kelepçelerinin düzgün ve sıkı bir şekilde kilitlendiğinden emin olun.



2. Ana çerçeveyi açın ve arka tekerlekleri yerleştirin (resimlerde gösterildiği gibi).



5. Tekerleği sıkamak için yayın altına metal bir halka takılması gerektiğine dikkat edin.



8. Eğilme önleyici ayaklık ile deliği hizalayın ve vidayı sıkın.



3. Önce küçük rondelayı takın.



6. Tekerleği frenleyin ve sıkamak için döndürün.



9. Kovayı, kova çerçevesine yerleştirin ve oturma plakasını arka seviye çubuğuna sabitleyin.