



BAKLAVA TİPİ HAVALI YATAK

Kullanma Kılavuzu

Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

MODEL: RHE-22



☒ KALIN KUMAŞ
☒ SESSİZ POMPA

Kullanım Talimatları

1. UYGULAMA

Yatalak hastalarda yatak yaralarının önlenmesi amacıyla kullanılır.

2. KULLANICI PROFİLİ

Yatalak hastalar, ameliyat sonrası hastalarda, idrar kaçırma durumlarında, lohusalarda ve bebeklerde.

3. ÇALIŞMA PRENSİBİ

Baklava Tipi Havalı Yatak hastalara değişken basınç sağlar ve yatak yaralarının önlenmesi ve tedavi edilmesi amaçlarıyla kullanılır. Yatakta bulunan 130 adet baloncuk her beş dakikada bir şişip sönererek hastaların tedavi edilmesini sağlar, bu şişip sönmeye sırasında basınçtan etkilenen hiçbir bölgeye olması gerekenden fazla basınç uygulanmaz. Değişken basınçlı 4 LPM (litre/dakika) pompa, sürekli bir hava akışı ve ayarlanabilir basınç üretir, bu sayede yatakta bulunan hava baloncuklarının değişken olarak şişip sönmeye sağlanır.

4. ÖZELLİKLER

- AC 220 V / 50 Hz
- Çalışma Ortamı Sıcaklığı: 10°C ~ 35°C
- Depolama Ortamı Sıcaklığı: -15°C ~ 50°C
- Çalışma Ortamı Bağıl Nem: %20 ~ %80, yoğuşmasız
- Depolama Ortamı Bağıl Nem: %10 ~ %90, yoğuşmasız
- Uzunluk 78,5", Genişlik: 35,5", Baloncuk Çapı: 3"
- Pompa Çıktısı: dakikada 4 litre
- Değişken döngü süresi 10 dakika
- Malzeme PVC (yangın önleyici)
- 136 kg ağırlığa kadar dayanıklı
- Baklava tipi tasarım hastalar için üstün tedavi sağlar.

5. KULLANIM TALİMATLARI

- Pompayı düz bir zemine yerleştirin veya kanca kullanarak asın.
- Yatağı yerleştirin. Köşelerinden sabitleyin. Hava tüpleri yatağın ayakucunda olmalıdır.
- Hava besleme tüplerini yataktaki ve pompadaki hava çıkışlarına bağlayın, tüplerin bükülmediğinden veya katlanmadığından emin olun.
- Pompayı çalıştırın. Güç düğmesinin ışığı yanacak ve pompa yatak içerisine hava akışına başlayacaktır.

Kullanım Talimatları

- Statik moda ayarlamak için statik tuşuna basınız, Statik ışığı yanacaktır. Statik modu yaklaşık 6 dakika içerisinde başlayacaktır. Değişken moda dönmek için tekrar statik tuşuna basınız.

NOT!

- Bazı modellerde değişken mod bulunmayabilir.
- Statik modda yatak hastanın taşınması ve yeniden konumlandırılmasını kolaylaştırmak için uygun bir yüzey oluşturur. Statik mod, hasta oturur pozisyondayken çökmesini önler.

6. UYARI

Kişilerde yanma, elektrik çarpması ve yaralanma risklerini azaltmak için:

- * Cihaz prize takılı iken asla gözetimsiz bırakılmamalıdır.
- * Cihazın çocuk ve erişkin olmayanlar üzerinde veya yakınında kullanıldığı durumlarda dikkatli bir şekilde gözetlenmelidir.
- * Kablo ve fişinde zedelenme olması durumlarında, düzgün çalışmadığı durumlarda, düşme ve zedelenme durumlarında veya suyla temas durumlarında cihazı asla kullanmayınız. Bu gibi durumlarda cihazı onarım için teknik servise götürünüz.
- * Elektrik kablosunu ısıtmalı ve sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.
- * Cihazın hava girişlerini asla tıkamayınız veya yatak ve koltuk benzeri, hava girişlerinin kapanabileceği yumuşak yüzeylere yerleştirmeyiniz. Hava girişlerine kıl, tüy, toz vb. girmesini önleyiniz.
- * Hiçbir açıklık veya tüp içerisine herhangi bir nesne düşürmeyiniz veya sokmayınız.
- * Dış ortamlarda veya aerosol (püskürtme) ürünlerin kullanıldığı ortamlarda çalıştırmayınız.
- * Cihazı yalnızca uyun şekilde topraklanmış prizlerde kullanınız.

İçerik Listesi

No	Bileşen	Miktar
1	Havalı Yatak	1
2	Pompa	1
3	Hortum	1
4	Sigorta (0,5 A)	1
5	Kullanım Kılavuzu	1

- * Hava pompasının çalışmadığı durumlarda, plastik poşet içerisindeki yeni sigorta kullanarak sigorta değiştirilebilir. Sigorta, pompanın altında yer alan siyah düğmede bulunabilir.



ECE TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL SAN. TİC. A.Ş.

Adres: Maltepe Mah. Hastane Yolu Sok. No: 6

Zeytinburnu / İSTANBUL

Tel: 444 78 96

Web: www.ecemedikal.net

www.respirox.com.tr

**Kullanım Kılavuzu İçin
Taratınız.**

