



KULLANIM KILAVUZU

HAVA VENTİLASYONLU
BORU TİPİ HAVALI YATAK

(Ayarlanabilir pompa ile)



Model: RHB-10




Kurulum ve Kullanım
Videosu için
For Installation and
Usage Video
Tarattınız.
Scan it.



Basım Tarihi: 04.11.2022

Çalışma Prensibi

- Yeterli bir ritimde değişen basınç, doku hipoksisine neden olması muhtemel olan uzun süreli vasküler kompresyonu önler.
- Değişken basınç, yatağı hastaya ve pozisyonuna göre ayarlar.

Kullanım Talimatları

Geleneksel olarak kabul edilen basınç kontrolü yöntemi, hastayı düzenli aralıklarla döndürmek ve risk alanlarını düzenli olarak gözlemlemektir.

Alternatif basınçlı yatak, bu tedaviyi tamamlamayı amaçlamaktadır, hastanın gözlemlenmesi ve gerektiğinde döndürülmesi de tedavinin bir parçası olarak düşünülmelidir.

Genel

- Yatakta günde 15 saatten fazla zaman geçirmesi muhtemel hastalar için.
- Basınç ülseri geliştirme riski orta ila yüksek olarak sınıflandırılan hastalar için.

Kurulum / Kullanım

1. Havalı yatağı açın.
2. Kurulacağı yere yerleştirin.
3. Sabitleme kayışları ile yatağa sabitleyin.
4. Kancaları kullanarak kompresörü (pompa) yatağın ucuna (ayak ucu) asın.
5. Uygun çıkışları eşleştirerek yatağı besleme borularını kompresör (pompa) konektörüne bağlayın.
6. Elektrik güç kaynağı kablolarını kompresöre (pompa) bağlayın.
7. Yatak boyunca prize yönlendirin ve fişini prize takın.
8. Kompresörü (pompa) açmak için düğmeye basın.
9. Hastayı yatağın üzerine yerleştirmeden önce tamamen şişmesini bekleyin.
10. Hastaya uygun basınç değerini seçin.

Güvelik Önlemleri

- Bu elektrikli ekipmanı çalıştırırken DİKKATLİ OLUN.
- Kullanılmadığı zaman elektrik kaynağına bağlı BIRAKMAYIN.
- Ekipmanı aşırı neme maruz BIRAKMAYIN.
- Endüstriyel yağ çözücüler veya asetik çözücüler gibi aşındırıcı temizlik ürünleri KULLANMAYIN.
- Elektrik kaynağına bağlıyken bu ekipmanın yerini değiştirmeye ÇALIŞMAYIN.

Temizlik / Dezenfeksiyon

Kompresör (Pompa):

- Temizlemeye başlamasan önce elektrik kaynağından ayırmaya DİKKAT EDİNİZ.
- Hafif deterjan solüsyonu ile nemlendirmiş bir bez kullanmaya DİKKAT EDİNİZ.
- Üreticilerin belirtmiş olduğu solüsyon konsantrasyonlarını uygulamaya DİKKAT EDİN.
- Temizleme solüsyonunus ilerken üreticinin tavsiyelerine uymaya DİKKAT EDİN.

Üretici tarafından önerilen kullanım konsantrasyonlarına uygun olarak, deterjan ürün solüsyonuile nemlendirilmiş bir bez veya CE işaretli bir yüzey deterjanı/dezenfektanı kullanın.

Bakım

Kompresör (pompa) bakım işlemleri kesinlikle ithalatçı tarafından yetkilendirilmiş ve eğitim almış bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

Yatak Özellikleri

Ağırlık Kapasitesi	: 130-140 kg
Yatak Ağırlığı	: 1,8-2,1 kg
Boyutlar	: 240 cm (U) x 97 cm (G)
Malzeme	: Naylon PVC/PU hücre, naylon PVC/PU kılıf

Kompresör (Pompa) Özellikleri

Döngü Süresi	: 12 dk
Hava Çıkışı	: 5 ~ 7 L/dk
Basınç Aralığı	: 50 ~ 120 mmHg
Güç Kaynağı	: 110 V / 220 V, 50-60 Hz
Güç Tüketimi	: 7 W

Semboller ve Anlamları

 CE İşareti	 Direkt gün ışığından koruyunuz
 Üretici Bilgileri	 Ambalajı hasarlı ise kullanmayınız
 Üretim Tarihi	 Yağmurdan koruyunuz
 Lot Numarası	 Kullanım talimatlarına bakınız
 Seri Numarası	 Kullanım Talimatları
 Referans Numarası	



ECE TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL SAN. TİC. A.Ş.

Maltepe Mah. Hastane Sok. No: 6 Zeytinburnu, İstanbul, Türkiye

Web: www.ecemedikal.net / www.respirox.com.tr

Tel: 444 78 96