



RHP-04 POZİSYON VEREN

BORU TİPİ HAVALI YATAK

Uzaktan Kumandalı



Özellikler:

Yatak

Boyut: 200cmx90cmx11.5-40cm

Hava Borusu Sayısı : 18

Malzeme: TPU

Ağırlık: 8.6 Kg

Maksimum Ağırlık: 150 kg

Pompa

Boyut: 28cmx10.2cmx16.5cm

Hava Çıkışı: 6-8 L/dk

Basınç Aralığı: 30-80mmHg

Döngü Süresi: 12/18/24 dk

Güç Girişi: 220V/50-60Hz

Ağırlık: 1.6 Kg

Fonksiyonlar: otomatik dönüşümlü, otomatik dönüş, baş ucunun ve ayak ucunun statik ve yükselmesi

Kurulum:


Güç kablosu ve hava hortumu konektörünün bağlanması:




Güç kablosu pompanın sol tarafına bağlanır, hava hortumu ise cihazın sağında bulunan hava hortumu portuna bağlanır.

Hava hortumu konektörünün bağlanması:

Aşağıdaki resme göre, hava hortumu konektörünü hava hortumu portuna bağlamak için hava hortumu konektörünün üçgen çıkıntılı kısmını pompanın hava hortumu portunun içbükey kısmıyla hizalayın (Şema 1). Tokayı serbest bırakmak için konektörün her iki tarafına bastırın (Şema 2) ve ardından konektörü içeri kaydırın (Şema 3), konektörün pompadaki hava hortumu portu ile bükülmesiyle tamamlanmıştır (Şema 4).

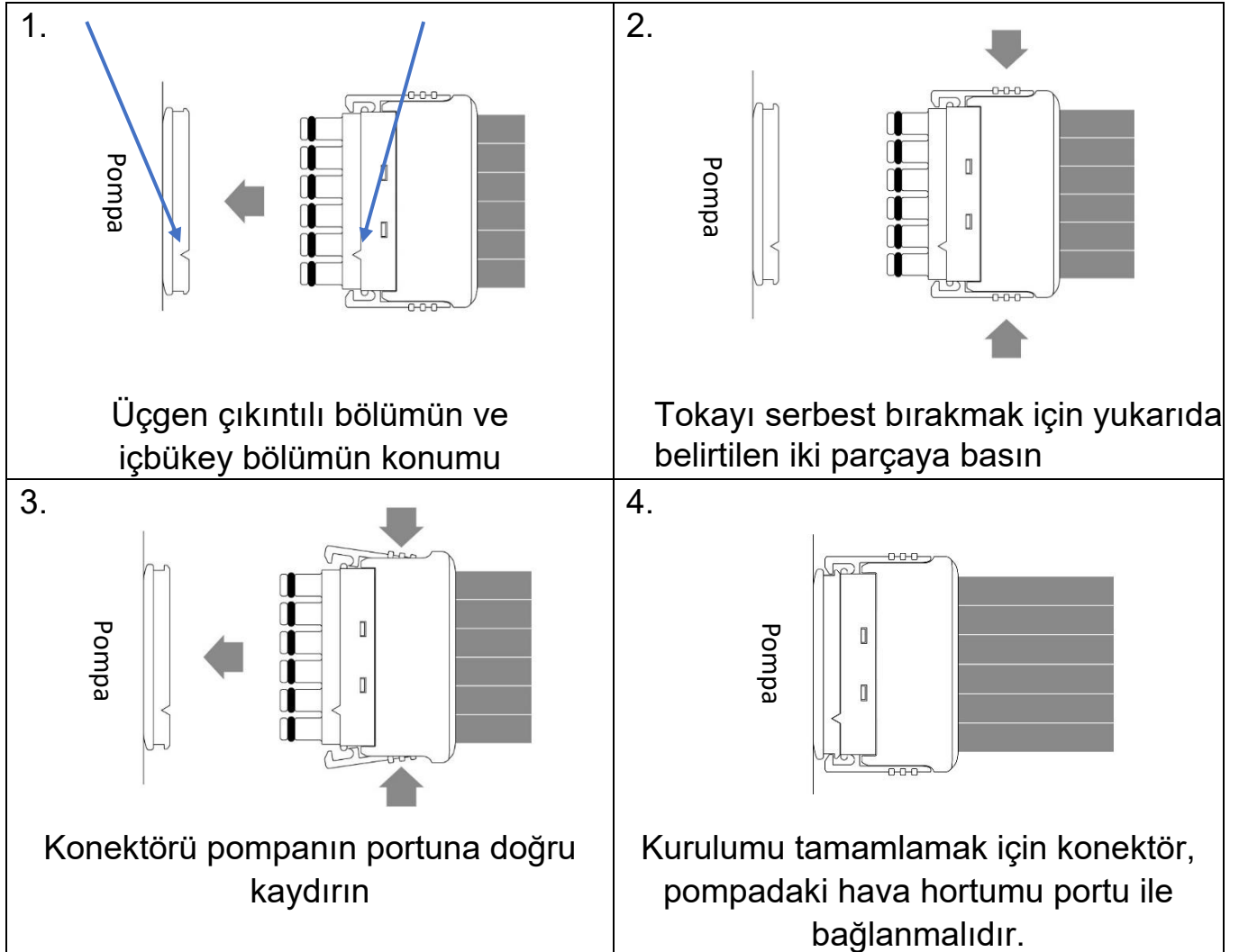

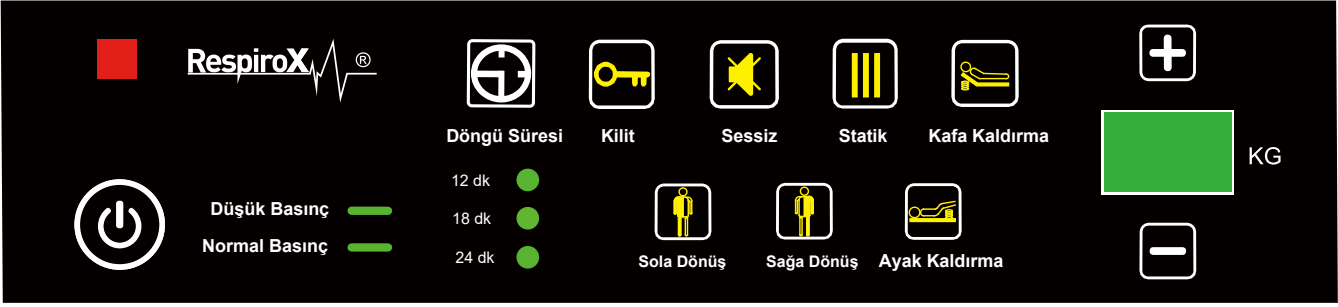

Uzaktan kumandadan gelen giriş, pompa panelindeki giriş ile aynıdır.

Kullanım:

Varsayılan: Hava tüpünü dönüşümlü şişirme ve söndürme özelliğine sahip A-B Değişken Modu

1. Pompayı çalıştırmak için Güç Tuşuna basın.
2. "+" ve "-" tuşlarını kullanarak kullanıcının ağırlığını KG cinsinden girin.
3. Döngü süresi tuşuna basarak hava tüplerinin değişken şişmesi ve sönmesi için döngü süresini ayarlayın. 3 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında tuşlar otomatik olarak kilitlenir. Bir işlem yapılmak istendiğinde Kilit tuşuna basılarak tuş kilidinin açılması gerekir.
4. Minimum basınca ulaşıldığında; pompa otomatik olarak değişken özellikte çalışmaya başlar. Ayrıca düşük basınç göstergesi söner ve normal basınç göstergesi yanmaya başlar.

Alarm

1. Pompa yapılan ilk ayarlamaya göre çalışır ve basın. düzenlemesi yapar. Çalışmaya başladıktan sonraki 60 dakika içerisinde minimum basınca ulaşamazsa pompanın alarmı devreye girer.
2. Alarm tuşuna basılarak alarm geçici olarak sessize alınabilir, 4 dakika sonra alarm tekrar çalmaya başlar. Minimum basınca hala ulaşamazsa alarm tekrar çalmaya başlar.
3. Alarm sürekli çalmaya devam ederse hava tüpleri veya hortumlarda herhangi bir hava kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz veya detaylı inceleme için teknik servis ile irtibat kurunuz.

Diğer Kullanımlar:

Statik Modu

Tüm tüpler statik basınca şişirilir.

1. Pompa çalışırken statik moduna geçmek için Statik tuşuna basılır.
2. 3 dakika boyunca herhangi bir etkileşim yapılmazsa pompanın tuşları otomatik olarak kilitlenir. Herhangi bir işlem yapılacağında kilit açmak için Kilit tuşuna basılması gerekir.
3. Statik basınca ulaşıldığında pompa otomatik olarak statik özelliği ile çalışır. Minimum basınca ulaşıldığında düşük basınç göstergesi söner ve normal basınç göstergesi yanmaya başlar.

Döndürme

Herhangi bir dönme tuşuna basıldığında sistem Statik Moda geçiş yapar. Şilte sağa ya da sola dönecek şekilde veya sağdan sola döngü halinde (dönme döngüsü - her iki yön dönmesi için yaklaşık 75 dakika) dönecek şekilde ayarlanabilir.

1. Sağa dönme, sola dönme veya her iki yöne dönme tuşlarından herhangi birine basıldığında sistem tüm hava tüpleri şişmiş olacak şekilde statik moduna geçer.
2. Basılan tuşa ait gösterge ışığı yanar ve şilte seçilen yönde dönmeye başlar.
3. 3 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında pompanın tuşları otomatik olarak kilitlenir.

Kafa Kaldırma / Ayak Kaldırma

Kafa kaldırma veya ayak kaldırma tuşuna basıldığında sistem Statik Moduna geçiş yapar. Sistem yalnızca kafa kaldırma ya da yalnızca ayak kaldırma fonksiyonu veya her ikisi de olacak şekilde ayarlanabilir.

1. Ayak kaldırma, kafa kaldırma tuşlarından herhangi birine veya her ikisine basıldığında sistem tüm hava tüpleri şişmiş olacak şekilde statik moduna geçer.
2. Basılan tuşa ait gösterge ışığı yanar ve şilte seçilen yönde hareket etmeye başlar.
3. 3 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında pompanın tuşları otomatik olarak kilitlenir.



ECE TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL SAN. TİC. A.Ş.

Maltepe Mah. Hastane Yolu Sok. No: 6
Zeytinburnu, İstanbul, TÜRKİYE

Tel: 444 78 96